

Was ist neu?

Prodigi Update V.4.4.0



Für:

- Connect 12
- Reveal 16i

Was ist neu?

Die neuen Features im Überblick:

Selbstansicht / Self View (nicht für Reveal 16i) und OCR-Abschaltfunktion

In den Einstellungen der Lupenanwendung ist ab jetzt eine Frontkameraoption verfügbar. Sie können zwischen der Rückkamera zum Vergrößern von Dokumenten und der Frontkamera, um sich selbst anzusehen, wählen. Ebenfalls können Sie die OCR-Funktion abschalten.

Klicken Sie ins Humanware-Video:

<https://youtu.be/xath59oD834>



Neue Schnittstelle für die Bücher-Anwendung - DOLPHIN

Mit Prodigy V.4.4.0 wurde die Dolphin Easy Reader Anwendung integriert. Damit haben Sie Zugang zu einer Vielzahl internationaler Bibliotheken und damit zu Büchern, Audiobüchern, Magazinen und Zeitschriften Ihrer Wahl. Bitte beachten Sie, dass für die meisten Bibliotheken Anmeldeinformationen für den Zugriff und die Nutzung der Inhalte erforderlich sind.

Klicken Sie ins Humanware-Video:

<https://youtu.be/waEskWF4sQw>



Schnelles Umschalten / Rapid Toggle

Die neue Option Schnelles Umschalten erlaubt es Ihnen schneller zwischen nutzerspezifischen Anwendungen (Prodigi oder Android) hin und her zu wechseln. Dazu streichen Sie mit zwei Fingern vom schwarzen Rand von links außen nach rechts, um von einer zur anderen Anwendung umzuschalten. Dies ist einfach komfortabel und spart Zeit.



Klicken Sie ins Humanware-Video:

<https://youtu.be/u1IDRN9Qcd0>

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen unser Serviceteam

montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr

unter

Telefon: +49 (0) 39361-967-216

oder

E-Mail: lowvision@visuSolution.com



Because
your
vision
matters