

Victor Reader Stream

WLAN verbinden via Humanware Companion



1. Wo finde ich den Humanware Companion


Sie können den Humanware Companion unter folgendem Link downloaden:

https://support.humanware.com/en-europe/support/humanware_companion


2. Installieren Sie die Software

3. Erstellen Sie das WLAN Profil:


Dazu muss die SD Karte des Readers mit dem PC verbunden sein über einen Kartenleser. Bei Laptops üblicherweise integriert. Danach starten Sie den Humanware Companion.

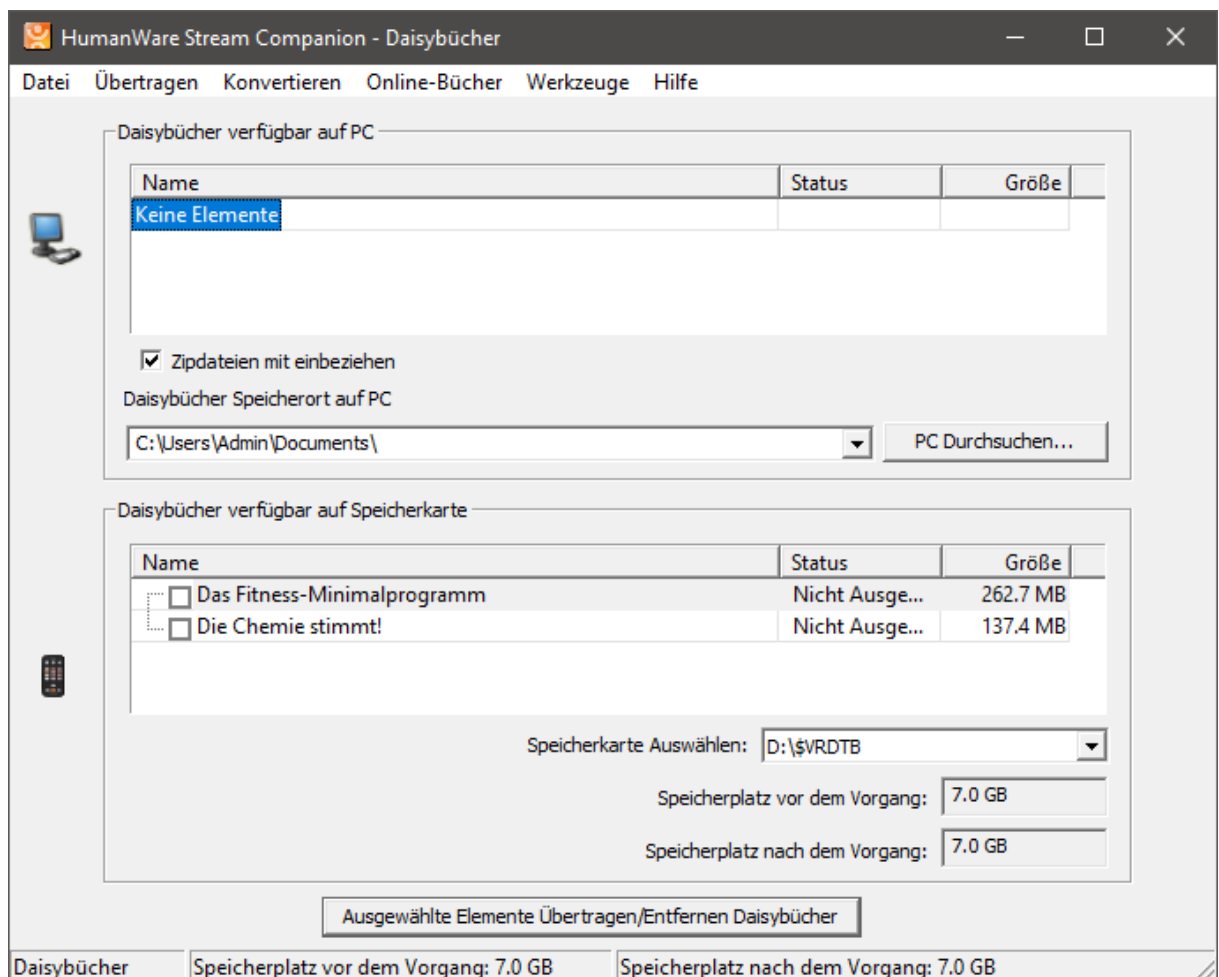

4. Oben im Menü-Band klicken Sie auf Werkzeuge und danach auf WLAN -Konfiguration:

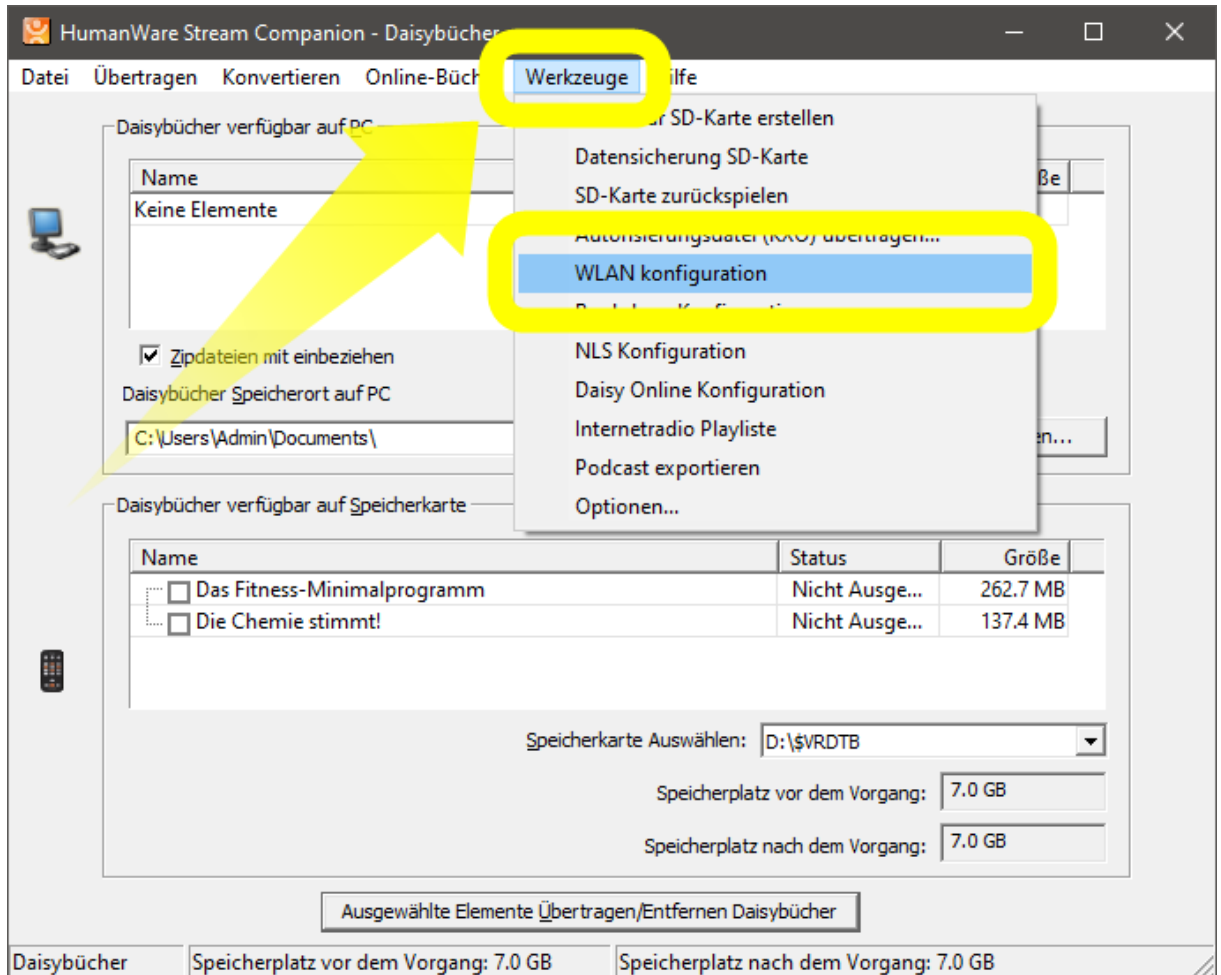

5. Tragen Sie im neuen Fenster den Namen Ihres WLAN-Netzwerks ein und den Schlüssel (Passwort):

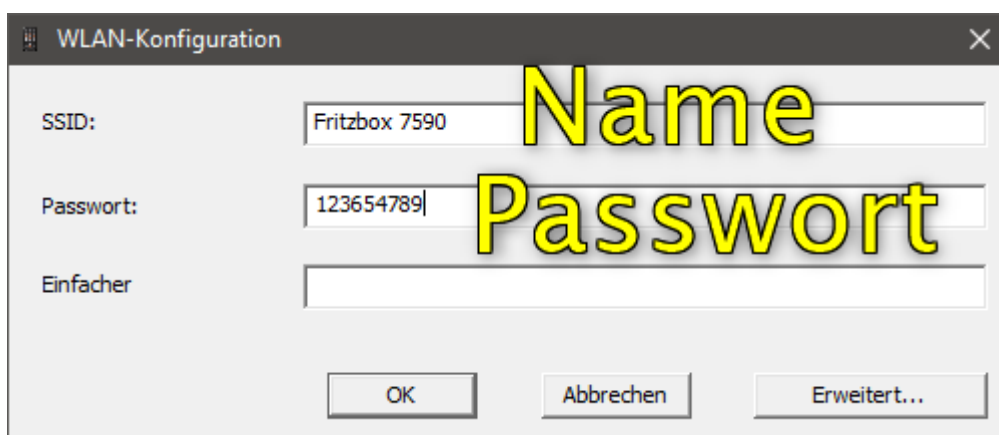

Danach bestätigen Sie mit OK.

Die Konfiguration befindet sich nun auf der SD-Karte.

6. Lesen Sie das Profil wie im Handbuch Kapitel 6.8 beschrieben ein. Das Handbuch finden Sie auf Ihrem Gerät oder unter

<https://www.visusolution.com/Service/LowVision/Handbuecher/DE-UG%20Stream.pdf>

<https://www.visusolution.com/Service/LowVision/Handbuecher/DE-UG%20Stream.docx>

Fertig!

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen unseren technischen Service

montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr

unter

Telefon: +49 (0) 39361-967-216

oder

E-Mail: lowvision@visuSolution.com