

Google Konto entfernen connect12 / Reveal16i



Verlassen Sie Prodigi mit der Fünf-Finger-Geste und öffnen Sie die Einstellungen von Android

				* 💎 🛿 13:10	
Einstellungen					
ល	HDMI	•	ScreenshotSetting		
ψ	USB				
Nutzer					
•	Standort	â	Sicherheit		
8	Konten	G	Google		
۲	Sprache & Eingabe	0	Sichern & zurücksetzen		
System					
0	Datum & Uhrzeit	ŧ	Bedienungshilfen		
•	Drucken	()	Über das Tablet		
)			



Wischen Sie weiter nach unten bis Sie "Konten" finden uns wählen es aus.

	Coordo	* ♥ 🖬 13:10
<u> </u>	Soogle visusolution.gmbh@gmail.com	
	Docs Zuistat spectromiaiset 20.09.21 13.07	<> <>
	Drive Zuletzt sprcferonisiert 20.09.21 12:07	4
	Gmail Zuletzt specificumialett 20.09121 13.07	•
	Georgie Kalender Zuistat sprochronisert 20.09.21 13:07	•
	Georgie News Spectromanneng AUS	
	Google Play Bücher Synchronisierung: AUS	

Sie sehen nun ihr Google Konto, finden und wählen Sie oben rechts die 3 Punkte

• <u>•</u>				* ♥ 🛿 13:10
÷	Google			Jetzt synchronisieren
	G visusolution.gmbh@gmail.com			Konto entfernen
	Decs Zuletzt specheurisaet: 20.09.21 13:07			4) 4)
	Drive Zuletzt specfronsiert, 20.04.21 13:07			() ()
	Grad Zuletzt spectromisiert 20.04.21 13:07			•
	Google Kalender Zuletzt spectromisaet: 20.04.21 13:07			•
	Georgie News Spectromolecurg ALS			
	Google Play Bücher Synchronisierung: AUS			
	$\Diamond \qquad \Diamond$	0		

Wählen Sie im Kontextmenü "Konto entfernen"



								* 🕈 🖬 13:10
÷	Google							
	Google visusolution.gmbh@gmail.com							
							دې 🔹	•
	-	Konto entfern	en?				C2	•
	H	Durch das Entfernen dieses Kontos werden alle zugehörigen Nachrichten, Kontakte und andere Daten vom Tablet gelöscht!					•	
	Scope Salardar	2012/10/						•
	Google Play Bücher Synchronisierung: AUS	r S					C	>
		Ð	\Diamond	0				

Wählen Sie jetzt im Hinweisfenster "Konto entfernen". Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Sollten weitere Konten verknüpft sein, bitte den Vorgang wiederholen.

Haben Sie Fragen? Sie erreichen unseren technischen Service montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter Telefon: +49 (0) 39361-967-216 oder E-Mail: lowvision@visusolution.com