

Prodigi Connect 12 Wie setzt man die OCR zurück?



Verlassen Sie Prodigi mit der Fünf-Finger-Geste und öffnen Sie die Einstellungen des Android-Menüs



					* ♥ 🖬 14:32
Einstellu	ingen				۹
Draht	los & Netzwerke				
•	WLAN		*	Bluetooth	
0	Datenverbrauch			Mehr	
Gerät					
A	Startseite		•	Display	
۰	Ton & Benachrichtigungen		ĕ	Apps	
	Speicher & USB		a	Akku	
	Speicher		•	Nutzer	
ល	HDMI		•	ScreenshotSetting	
,tr	LICP				
	\Box	<	\mathbf{O}		

Öffnen Sie Apps

						*	V1 1	14:32
÷	Apps						۵	:
	Û	Android für Barrierefreiheit 205 MB						
	\$	Android System WebView						
	÷	ApkInstaller 24,00 KB	Nach unten wische	2				
		Bücher 70,08 MB						
	Ø	Chrome 134 MB						
		Cloud Print 11,31 MB	,					
	00	Currents 51,04 MB						
		\Box	\bigtriangledown	0				

Unter Apps navigieren Sie nach unten



							*▼∎	14:32
÷	Apps						\$:
		Präsentationen 183 MB						
	•	Prodigi 412 MB						
	\$	Prodigi Updater 345 MB						
	ň	ProdigiOCR 215 MB						
	ň	ProdigiVoices 430 MB						
		QuickSupport 53,34 MB						
		Rechner 19,33 MB						
			$\widehat{\Box}$	\bigtriangledown	0			

Wählen Sie die App ProdigiOCR aus.

		* ▼ ∎ 14:32							
÷	App-Info								
	ProdigiOCR Version 2.12 DEINSTALLIEREN BEENDEN ERZWINGEN								
	Speicher 215 MB Interner Speicher belegt								
	Datenverbrauch Keine Daten genutzt								
	Berechtigungen Keine Berechtigungen angefordert								
	Benachrichtigungen Normal								
	Standardmäßig öffnen								

Wählen Sie [Deinstallieren] und bestätigen Sie den Vorgang.





Gehen Sie zurück zum Hauptbildschirm und öffnen Sie die App-Übersicht.

											* ▼ 🖡 14:33
											Q
Apkinstaller	Bücher	Chrome	Currents	Distanz	Docs	Downloads	Drive	Einstellungen	Explorer	Fotos	Gmail
Google	Google Play Filme	Hangouts	31 Kalender	Kamera	Kontakte	Maps	Messages	GE	G News & Wetter	Notizen	Play Bücher
Play Musik	Play Spiele	Play Store	Präsentationen	Prodigi	Prodigi Updater	QuickSupport	- × + = Rechner	Rechner	Soundrekorder	Sprachsuche	Tabellen
Uhr	Video	YouTube									
			Û	\triangleleft	C)		Ð			

Führen Sie den Prodigi Updater aus. Dieser lädt die OCR neu.

Fertig!



Haben Sie Fragen?

Sie erreichen unseren technischen Service

montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr

unter

Telefon: +49 (0) 39361-967-216

oder

E-Mail: lowvision@visusolution.com