

Prodigy Connect 12 Wissen Level 6

Wie verbinde ich die Kodak-Distanzkamera mit dem Prodigy Connect 12 Tablet ?



Level 6

Wie verbinde ich die Kodak-Distanzkamera mit dem Tablet

Die Prodigy App enthält eine Distanz-Funktion, mit der Sie eine kabellose Kodak-Distanzkamera nutzen können, um Dinge oder Lesegut in der Ferne anzusehen und Screenshots aufzunehmen und erfassten Text mit Prodigy lesen zu können.

The Connect 12 tablet supports the use of the Kodak SL10 and SL25 wireless distance cameras. Das Connect 12 Tablet unterstützt die Verwendung der drahtlosen Distanzkameras Kodak SL10 und SL25.

Um die Distanz-Funktion in Prodigy zu nutzen, müssen Sie die drahtlose Kopplung zwischen dem Connect 12-Tablet und der Kodak-Kamera einmalig einrichten. Danach wird die drahtlose Verbindung aufrecht erhalten.

Hinweis: There are two instances in which you would need to go through the pairing procedure again: Es gibt zwei Fälle, in denen Sie den Pairing-Vorgang, d.h. die Kopplung, erneut durchführen müssen.

- Sie haben eine bestimmte Kodak-Kamera mit dem Tablet gekoppelt und möchten jetzt aber eine andere Kodak-Kamera mit dem Tablet nutzen
- Sie haben das Tablet auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kodak-Distanzkamera mit dem Tablet zu koppeln:

1. Stellen Sie sicher, dass das Connect 12-Tablet eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kodak-Kamera ausreichend geladen und eingeschaltet ist.

Datum: 16.03.2020

3. Tippen Sie auf dem Connect 12-Tablet solange den Zurück-Button bis das Haupt-/Karussellmenü angezeigt wird.
4. In the main / carousel menu, tap the Settings option to open the Settings menu. Im Haupt-/Karussellmenü tippen Sie auf den Menü-Button Einstellungen, um diese zu öffnen.
5. In den Einstellungen tippen Sie auf den Menüunterpunkt „System“, um diesen zu öffnen.
6. Im Untermenü System gehen Sie auf „Wi-Fi –Einstellungen“.
7. In den Wi-Fi-Einstellungen wählen Sie „WLAN Netzwerke“.
8. Dort wird Ihnen eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke und Geräte angezeigt.
9. Tippen sie auf den Kodak-Name, um die Kamera auszuwählen.
10. Dann tippen Sie auf „Verbinden“.
11. Dann werden Sie aufgefordert das WLAN-Passwort für die Kamera einzugeben. Tippen Sie 12345678 ein und tippen Sie auf die kleine „Häkchen“-Taste auf der Tastatur.
12. Das Tablet sollte jetzt die Drahtlosverbindung zur Kamera herstellen. Sie können jetzt solange den Zurück-Button drücken, bis Sie ins Haupt-/Karussellmenü gelangen.
13. Sie können jetzt den Distanzmodus und die Funktionen von Prodigy verwenden. Ausführliche Anleitungen und Informationen zum Distanzmodus finden Sie unter „Level 5 – Wie nutze ich den Distanzmodus“.

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen unseren technischen Service

montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr

unter

Telefon: +49 (0) 39361-967-17

oder

E-Mail: hotline@visuSolution.com



Because
your
vision
matters