

visuReal MASTER Update 1.0.13



Sehr geehrte visuReal Master Nutzer,

wir freuen uns, Ihnen das neue visuReal Master Update zur Verfügung zu stellen. Hier finden Sie Informationen zum neuen visuReal Masster Update 1.0.13. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns!

Ihr visuSolution-Team

THEMEN

Verbesserungen + Änderungen:

1. Performanceverbesserung
2. Funktionsstabilisierung
3. Diverse Sprachübersetzungsaktualisierungen
4. Bessere Darstellung der Softwarebuttons auf der Seite Messungen der letzten 48 Stunden


Neue Features:

5. FSW-Messung, Anzeige und Übertragung des Fassungs-scheibenwinkels (FSW) an Hoya und per E-Mail
6. Übertragung der Auftragsnummer als Kommission an Hoya
7. Software auf Portugiesisch und Spanisch


Infos zu Verbesserungen:

Punkt 4 Bessere Darstellung der Softwarebuttons auf der Seite „Messungen der letzten 48h“

Vorgängerversion 1.0.6

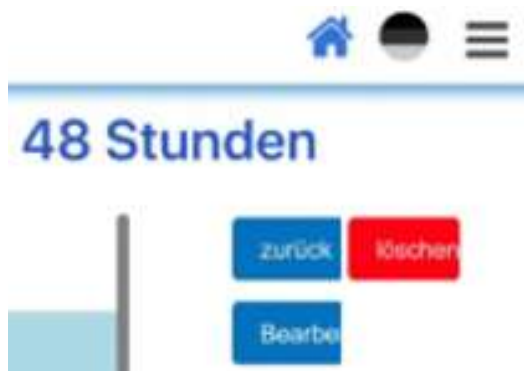

Aktuelle Version 1.0.13

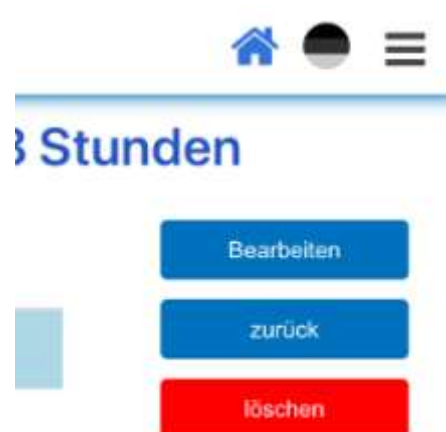

Die Softwarebuttons [Bearbeiten], [zurück] und [löschen] wurden in der Größe angepasst und neu angeordnet für eine bessere Lesbarkeit, Darstellung und damit Bedienbarkeit.

Infos zu neuen Features:

Punkt 5. FSW-Messung, Anzeige und Übertragung des Fassungscheibenwinkels (FSW) an Hoya und per E-Mail

Die Messung des Fassungscheibenwinkels nach neuer Messmethode wurde integriert samt Übertragung an Hoya oder Versandoption per E-Mail

The screenshot shows the visuReal MASTER web interface. The browser address bar displays '192.168.77.30'. The page title is 'visuReal MASTER'. The interface is divided into several sections:

- Kundendaten:** Auftragsnummer, Uhrzeit (2019-10-15 15:09:39)
- Fassungsmaße:** Fassungsscheibenbreite (A): 54.6, Fassungsscheibenhöhe (B): 36.3, Abstand zwischen den Gläsern: 17.4, **Fassungsscheibenwinkel (°): 11.4** (highlighted in red), Fassungsart: Metall
- Zentrierwerte:** Pupillendistanz: 64.4, x: R 30.6 L 33.7, y (zum Kasten): R 21.5 L 21.1
- Kopfhaltung:** Hornhaut-Scheitel-Abstand: 18.3, Vorneigung (Grad): 8.2
- Lens:** Glasart: Gleitsicht, max. Progressionskanallänge: 14.6

At the bottom right, there are four blue buttons: Bearbeiten, Daten-E-Mail, Datenexport, and Fertig.

Punkt 6. Übertragung der Auftragsnummer als „Kommission“ an Hoya

Beim visuRealMaster können Sie in das Eingabefeld „Auftragsnummer“ eine beliebige Kundenreferenz in Form von Zahlen oder Text eingeben. Diese Information wird bei der Übertragung an Hoya automatisch in das dortige Feld „Kommission“ übertragen.

Punkt 7. Software auf Portugiesisch und Spanisch

Die Softwareoberfläche kann ab dieser Version auf Spanisch und Portugiesisch umgestellt werden.



039361 - 967 – 17



hotline@visuSolution.com



Lüderitzer Weg 6 39517 Tangerhütte OT Brunkau



www.visuSolution.com

Designed and developed by 