

visuReal MASTER Update 1.5.1



THEMEN


Neue Features:

1. Neuer Hauptmenüpunkt „Help“
2. Help-Seite
3. Erweiterte Verfügbarkeit der Kundendaten von 48 auf 72 Stunden
4. Desktop Icon
5. Editiermöglichkeit für die Kundenreferenz (Order ID) auf der Ergebnisseite
6. Ergebnis-E-Mail: Betreffzeile mit Referenz / Order ID
7. Neue Update-Nachricht (jetzt updaten, überspringen, später)
8. FSW: Reduzierung der Sensibilisierung
9. Verkürzung der Programmseiten des Messvorgangs

Infos zu den neuen Features

Punkt 1+2: Neuer Hauptmenüpunkt „Help“ und Link zur Help-Seite

Hilfe rund um die Uhr! Mit dem neuen Menüpunkt Help erhalten Sie Zugang zu zusätzlichen Informationen rund um den visuReal MASTER.. Er führt Sie zum Benutzerhandbuch, dem FAQ -Bereich, einem Videotutorial und gibt einen Überblick über die neuen Features.

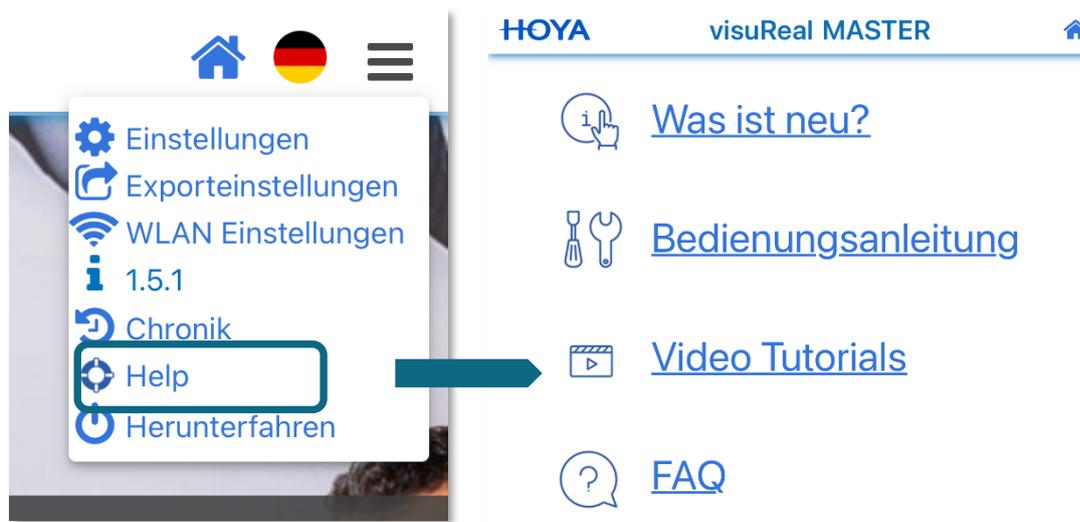

Punkt 3: Erweiterte Verfügbarkeit der Kundendaten von 48 auf 72 Stunden

Mehr Zeit- mehr Flexibilität für Sie! Ab der Version 1.5.1 sind die Messdaten Ihrer Kunden 72 Stunden verfügbar bevor sie automatisch gelöscht werden (Wochenende ausgenommen).



Punkt 4: Desktop Icon

Kleines Feature – große Hilfe! Ab jetzt finden Sie Ihre visuReal Master Software noch schneller und einfacher dank des neuen Desktop Icons. Sie legen es einfach einmal auf dem Desktop ab, indem Sie den visuReal Master-Link mit Ihrem Desktop verknüpfen. Wie das geht, hängt vom jeweiligen Browser ab.




Punkt 5: Editiermöglichkeit für die Kundenreferenz (order ID) auf der Ergebnisseite

Sie haben gleich am Anfang einen Fehler bei der Eingabe der Order ID gemacht? Kein Problem! Sie können diese auf der Ergebnisseite bearbeiten und ändern.




Punkt 6: Ergebnis-E-Mail: Betreffzeile mit Referenz/Order ID

Einfache Zuordnung: Wenn Sie die Ergebnisseite per E-Mail versenden, enthält die Betreffzeile jetzt automatisch die Referenz / Order ID, sodass Sie die Daten bequem zuordnen können.

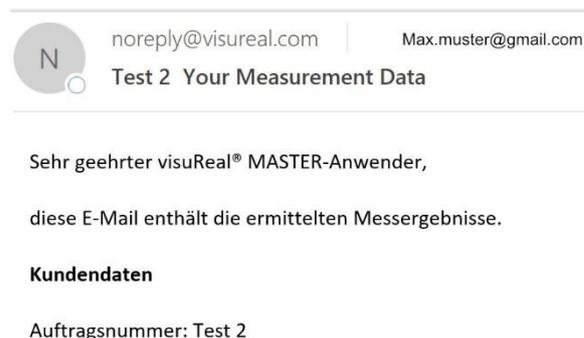

Punkt 7: Neue Updatenachricht

Ab sofort gibt es nicht nur den bekannten roten Punkt, der Ihnen ein Update anzeigt. Es erscheint eine Meldung mit drei Optionen auf dem visuReal Master Startbildschirm: Sie können entscheiden, ob Sie das Update sofort durchführen, überspringen oder auf später verschieben – bei letzterem können Sie ein Datum eingeben, wann die Nachricht erneut aufpoppen soll, um Sie zu erinnern, auf den roten Punkt zu klicken und das Update durchzuführen.

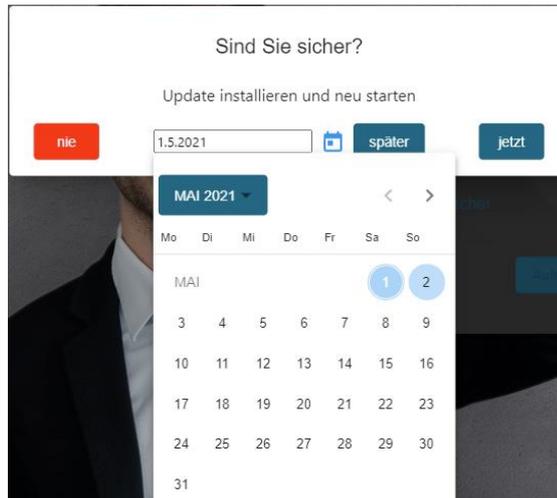


Punkt 8: FSW Reduzierung der Sensibilisierung

Die zugesagten Streuungen liegen im Toleranzbereich.




Punkt 9: Reduzierung der Programmseiten des Messvorgangs

Die Programmseiten für die Messung wurden von drei auf zwei Seiten reduziert. Für eine nutzerfreundlichere Anwendung, bessere Orientierung und einen besseren Überblick.

Seite 1: Cursorpositionierung der Augen prüfen

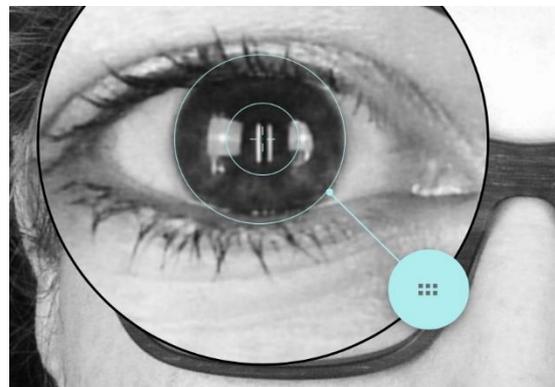

Seite 2: Kastenmaß-Messmarken und zusätzliche Punkte prüfen - alles auf einer Seite.

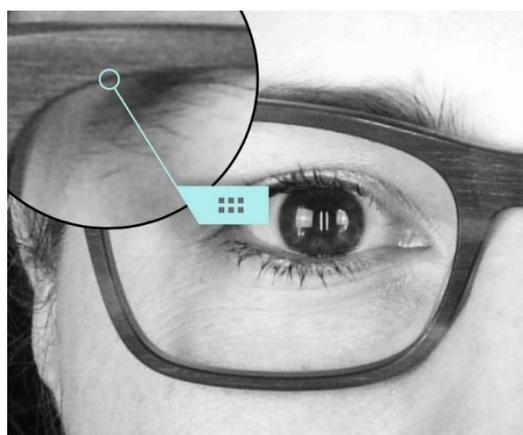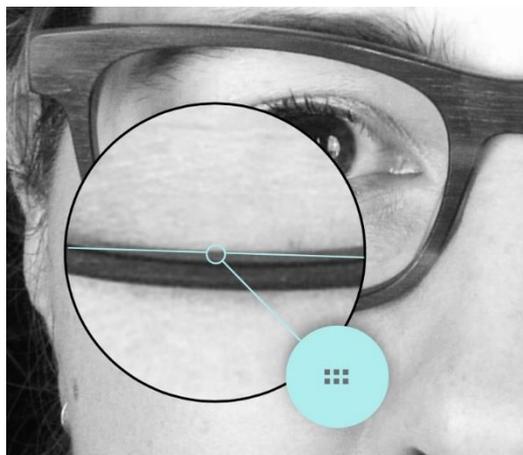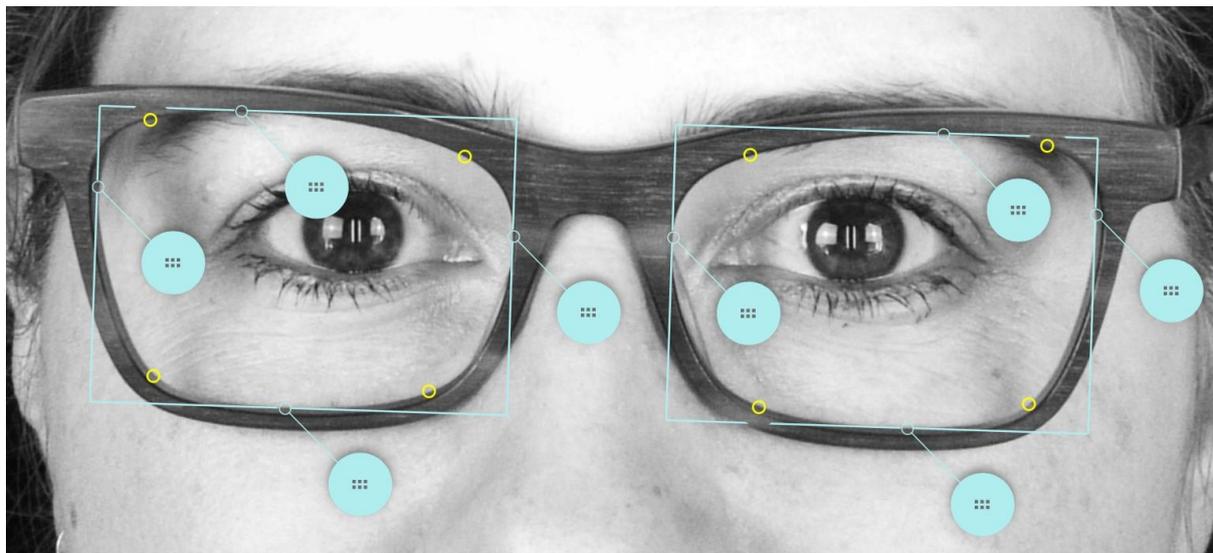

+49 (0) 39361 - 967 – 17



hotline@visuSolution.com



Lüderitzer Weg 6 39517 Tangerhütte OT Brunkau, Germany



www.visuSolution.com

Designed and developed by

