

visuReal MASTER Update 1.6



THEMEN

Neue Features:

- 1. Multi-User-Fähigkeit**
- 2. DSGVO-konforme Speicherzeiterweiterung auf 6 Monate**

Infos zu den neuen Features

Punkt 1: Multi-User-Fähigkeit

Mehr Flexibilität im Arbeitsalltag – ab Version 1.6. können Sie den visuReal MASTER auf bis zu 15 Endgeräten gleichzeitig bedienen.

Und wie geht das? Hier kommen die Details:

1. Aufnahme und Bearbeitung:

Messbildaufnahmen können immer nur von einem Gerät gemacht werden. Aufgenommene Messungen/Messbilder können von bis zu 15 Endgeräten gleichzeitig aus bearbeitet werden. hierbei gilt „Wer zuerst kommt, malt zuerst“, d.h. das Gerät, das zuerst die Aufnahme für eine Messung startet, erhält die Rechte für die Aufnahme. Sobald die Aufnahme abgeschlossen ist, kann dasselbe oder ein anderes Gerät Aufnahmen starten und die Rechte werden erneut an das entsprechende Gerät vergeben.

2. Gerätehierarchie:

Es gibt keine Hierarchie unter den Geräten, alle haben die gleichen Berechtigungen.

3. Messungen bearbeiten:

Solange eine Messung von einem Gerät bearbeitet wird, kann diese nicht von einem anderen Gerät aus geöffnet werden. Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung.

4. Automatisches Speichern von Messungen:

Können Sie eine Messung nicht fertig bearbeiten, wird diese nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch mit der letzten Änderung gespeichert und die Software kehrt zur Startseite zurück. Inaktivität heißt, keine Messmarken werden angefasst / verändert und keine Buttons werden getippt. Die Messung kann später aus der Chronik wieder geöffnet und bearbeitet werden.

5. Zugriffsbegrenzung:

Maximal 15 Endgeräte erhalten Zugriff auf Messungen. D.h. 1 Gerät kann aufnehmen und 14 Geräte haben gleichzeitig Zugriff auf bereits vorhandene Messungen der visuReal MASTER Software. Zweiter möglicher Fall: Es können 15 Geräte auf Messungen zugreifen, ohne dass eins davon gerade eine Aufnahme startet.

Punkt 2: DSGVO-konforme Speicherzeiterweiterung auf 6 Monate

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, auch noch nach Wochen und Monaten auf Messdaten zuzugreifen und diese auszuwerten oder zu bearbeiten. Dafür gibt es die Speicherzeiterweiterung auf 6 Monate. Standardmäßig werden visuReal MASTER-Geräte mit 72 Stunden Speicherzeit ausgeliefert. Möchten Sie diese Zeit verlängern müssen Sie die dazu die entsprechende DSGVO-Erklärung aktiv bestätigen.

Und wie geht das? Hier kommen die Details:

- 1) Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein.
- 2) Im Hauptmenü muss der Menüpunkt „Datenschutz“ ausgewählt werden.



- 3) Eine neue Seite mit der DSGVO-Bestimmung wird angezeigt

DATENVERARBEITUNGSVEREINBARUNG (DPA)

Die Parteien vereinbaren, dass diese Datenverarbeitungsvereinbarung ("DPA") ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten (wie diese Begriffe nachstehend definiert sind) festlegt, wenn der Kunde das VisuReal Master Tool ("VRM") nutzt, eine Dienstleistung, die von der Firma visuSolution GmbH ("visuSolution") für Sie ("Kunde") gemäß den Bestimmungen und Bedingungen oder der Vereinbarung zwischen den Parteien ("Vereinbarung") bereitgestellt wird. Durch die weitere Nutzung von VRM erklärt sich der Kunde damit einverstanden, die Bedingungen dieser Vereinbarung einzuhalten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieser DPA und den Bestimmungen der Vereinbarung hat diese DPA Vorrang.

1. DEFINITIONEN UND QUALIFIKATIONEN

Sofern in dieser DPA nicht ausdrücklich anders angegeben, haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:

- "Verantwortlicher", "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten", "Betroffene", "Aufsichtsbehörde", "personenbezogene Daten", "Verarbeitung" und "Auftragsverarbeiter" haben dieselbe Bedeutung, wie sie in der DSGVO festgelegt ist.
- "Anwendbare Datenschutzgesetze" bezeichnet alle anwendbaren Gesetze, die sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser DPA beziehen, einschließlich und ohne Einschränkung der GDPR und CCPA.
- "GDPR" bezeichnet die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
- "CCPA" bezeichnet den California Consumer Privacy Act von 2018 (in der jeweils gültigen Fassung), Cal. Civ. Code §§ 1798.100-1798.199 in der jeweils geltenden Fassung, die von Zeit zu Zeit geändert, aufgehoben, konsolidiert oder ersetzt wird.
- "Controller to Processor Clauses" bezeichnet, soweit zutreffend, die Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an in Drittländern ansässige Datenverarbeiter, die im Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010 festgelegt sind, in der jeweils geänderten, aktualisierten, ersetzten und gültigen Fassung.
- "Auftragsverarbeiter-Klauseln" bezeichnet, soweit zutreffend, die Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an in Drittländern niedergelassene

Zurück

Bestätigen

- 4) Wenn der Text der DSGVO-Bestimmungen erscheint, lesen Sie den Text vollständig und sorgfältig durch. Der Text muss nach unten gescrollt werden, damit Sie die Pflichtfelder ausführen können.


- 5) Pflichtfelder Ausfüllen:
 - a. Firmenname
 - b. Kundennummer (visuSolution)
 - c. Name des Anwenders
 - d. Seriennummer des vRM Gerätes (Wird vom System ausgelesen)

<p>My company name</p> <p>My customer number</p> <p>My name</p> <p>Serial number of visuReal Master</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="75"/>
---	---

Zurück

Bestätigen

- 6) Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, bestätigen Sie die DSGVO-Bestimmung. Diese Bestätigung wird an den visuReal MASTER Server gesendet.
- 7) Sie erhalten die Nachricht, dass die 6 Monate Speicherzeit aktiviert wurden.

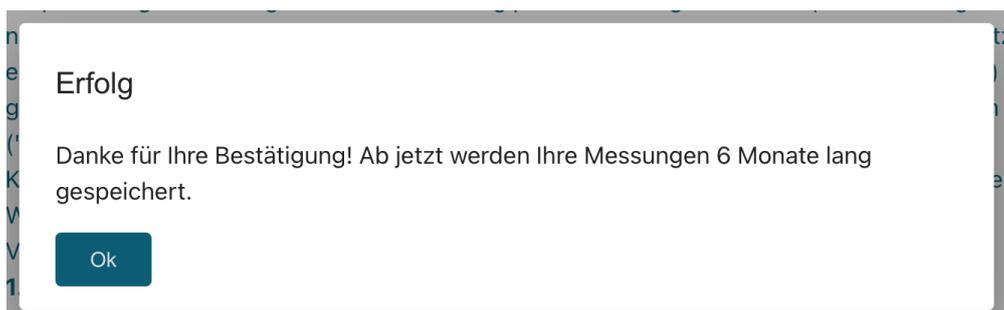



Messungen der letzten 6 Monate

Uhrzeit Auftragsnummer Zuletzt bearbeitet Fertig

Weitere wichtige Hinweise dazu:

- Die DSGVO-Bestimmung erscheint derzeit ausschließlich in deutscher und englischer Sprache.
- Sobald Sie der DSGVO-Bestimmung zugestimmt haben, können Sie die Zustimmung über den visuReal MASTER nicht mehr rückgängig machen. Möchten Sie Ihre Zustimmung widerrufen, müssen Sie das schriftlich (per E-Mail) an visuSolution kommunizieren. Die Deaktivierung der verlängerten Speicherzeit erfolgt per Fernwartung im Auftrag von visuSolution. Über den Erfolg der Zurückstellung werden Sie nachträglich von visuSolution informiert.
- Bei einer Rücknahme des Gerätes vom Kunden muss die verlängerte Speicherzeit deaktiviert werden, bevor das Gerät wieder an einem anderen Kunden / Augenoptiker verkauft / ausgeliehen wird.
- Es wird nicht empfohlen, die Speicherzeiterweiterung auf Ersatzgeräten/Tauschgeräten zu aktivieren.
- Im Falle eines Rechtsstreits kann das bestätigte DSGVO-Dokument bei der visuSolution oder Hoya Global angefordert werden.



+49 (0) 39361 - 967 – 17



hotline@visuSolution.com



Lüderitzer Weg 6 39517 Tangerhütte OT Brunkau, Germany



www.visuSolution.com

Designed and developed by

